



Dr.Bean *Slim & Beauty*

訂購熱線 : (852)5162-2237


email : info.dr.bean@gmail.com

四合一美容儀

貨品編號： P2-F5-5

產品分類： 美容儀器

集高頻率吸黑頭等4合一功
可能消炎殺菌預防暗瘡

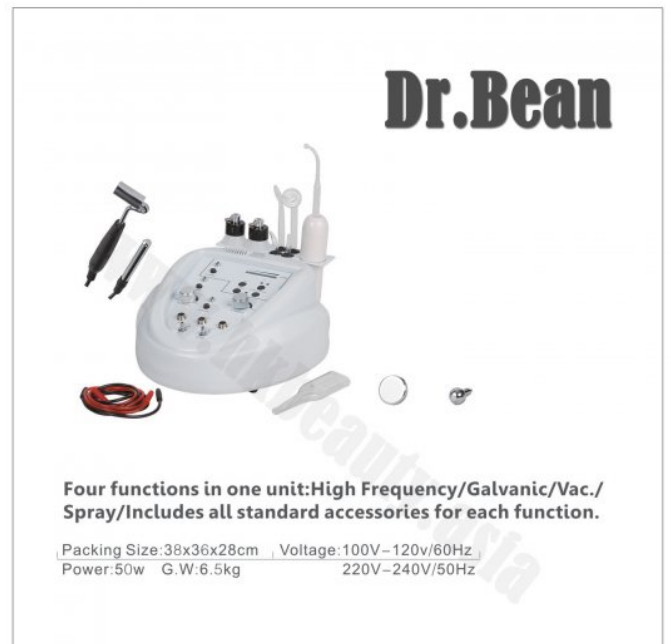


一台四合一多功能美容儀可節省不少位置，內有四種不同功效，一機便可大派用場，



Dr.Bean *Slim & Beauty*

訂購熱線 : (852)5162-2237

email : info.dr.bean@gmail.com

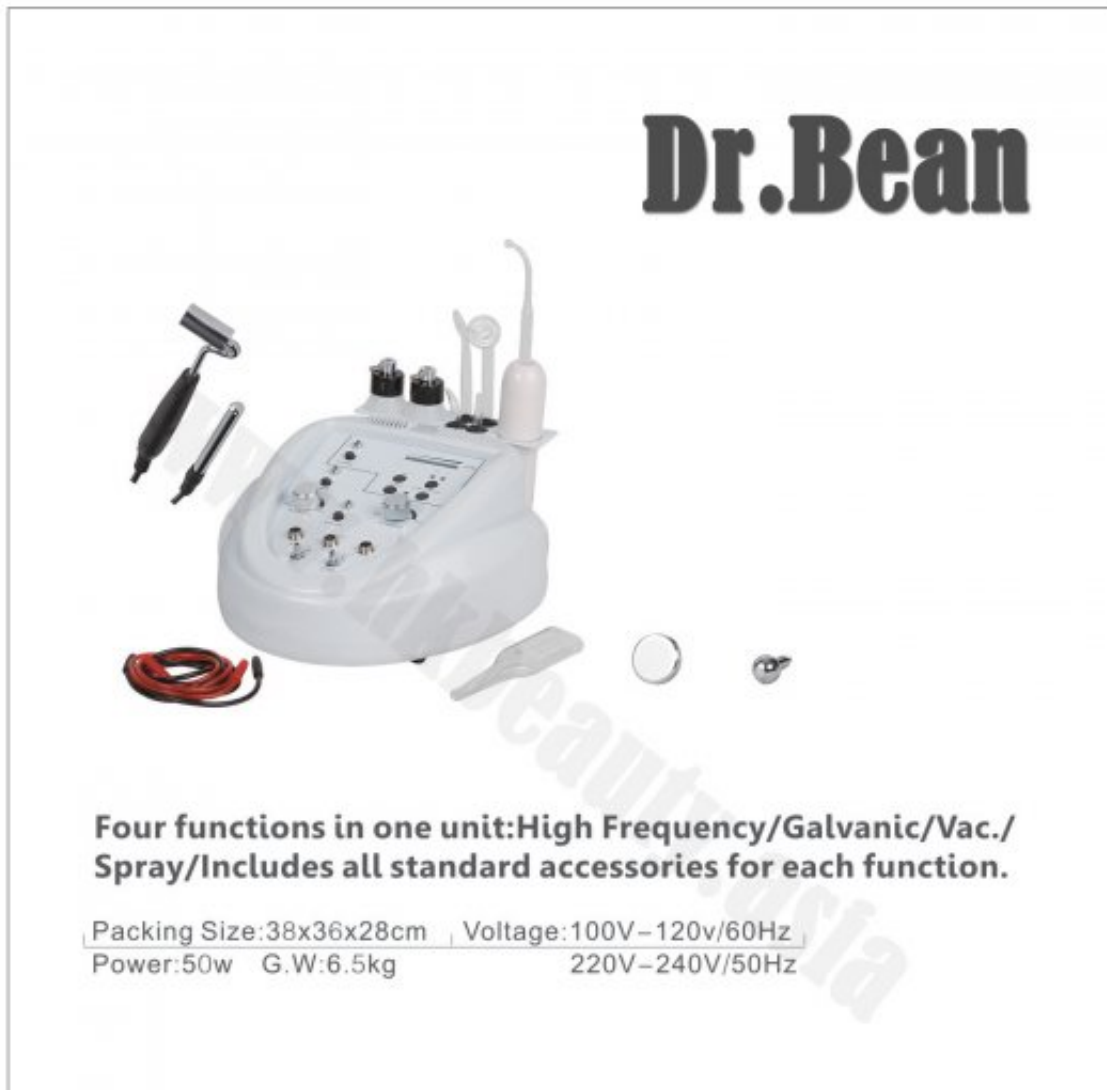


產品功能

高頻率

發出的氬氣可以幫助皮膚的消炎，殺菌，預防油脂暗瘡再復發，高頻率利用高頻率電流的振動產生熱效應和紫外線以及電流治療皮膚的儀器，刺激血液循環，增進腺體的活動，幫助排泄和吸收，促進新陳代謝，一般主要為殺菌作用，在組織中產生熱力，幫助美容產品滲透進入皮膚裡面。使用時須注意，使用時間勿過長，以免刺激底層色素。

吸功能

可以輕易吸出表皮上的油脂污垢亦可作淋巴引流使用，吸啗的功能將毛細孔中多餘的油脂，污垢等作深層清除，具有吸引作用，能將油皮膚毛囊孔中多餘的黑頭、白頭等吸啗出來，一般主要用於臉部的“T”字部位，亦可帶動淋巴作引流使用，刺激穴位，改善身體面部循環，去除皮膚毒素。

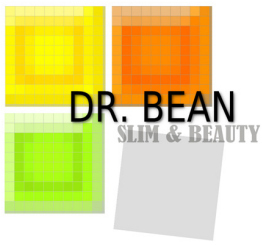

Dr.Bean *Slim & Beauty*

訂購熱線：(852)5162-2237

email : info.dr.bean@gmail.com

使用時須注意，吸力及時間長短，皮膚厚薄、力度及肌肉方向控制切勿過份吸嘍，引起紅癢。

噴功能

可作精華噴霧使用，或配上爽膚水亦可

噴化的功用可將任何水狀物質呈現霧狀噴出，具有營養及鎮靜皮膚作用，快速地補充皮膚細胞所需的營養、水份及鎮靜、安撫皮膚的功效亦可以用作清洗皮膚時使用，可控制出水量，安全衛生。

賈法尼 - 陰陽離子

可將精華導入皮膚，易於吸收，導出皮膚污物，增加美容療程效果。

陰陽離子是利用直流電的正、負電相斥的原理，將相同極性藥物（或營養活性物質）通過汗腺孔，滲透到皮膚的深部，或利用直流電極性作用加強藥物（或營養活性物質）對皮膚的滲透，以達到美化皮膚的作用。

電離子滲入療法：反極性電離子打開表皮層和真皮層之間的通路，讓離子進入真皮層，增強皮膚分子的穿透性，幫助皮膚吸收抗老化活性物質，使護膚產品滲入到真皮層，直接作用于纖維原細胞，刺激新膠原質和彈性物質的生成。

歡迎查詢。